

# ANLEITUNG ZUM FLOWFLEX-SELBSTTEST


EXTRAKTIONSPUFFERRÖHRCHEN



EINWEGTUPFER



TESTKASSETTE

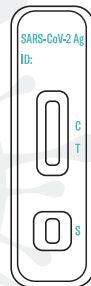

## POSITIV?

DIE SCHULLEITUNG INFORMIERT 1450 ODER  
DIE ÖRTLICHE GESUNDHEITSBEHÖRDE.

## NEGATIV?

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, GESUND BLEIBEN  
UND WEITER DIE SCHULE BESUCHEN!

# 1

- Schnäuzen vor dem Test
- Halterung zusammenbauen
- Röhrchen mit Pufferlösung aufschrauben und in die Halterung stellen, ohne es zu drücken
- Stäbchenverpackung mit einer Schere aufschneiden

# 2

- Tupfer ca. 2,5 Zentimeter in ein Nasenloch einführen
- Das Stäbchen 5 Mal drehen, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
- Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

# 3

- Röhrchen mit Pufferlösung aus der Halterung nehmen
- Das Stäbchen einführen und 30 Sekunden umrühren
- Röhrchen zusammendrücken und währenddessen das Stäbchen mindestens 5 Mal drehen
- Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Röhrchen spritzt!

# 4

- Stäbchen entnehmen und dabei Röhrchen zusammendrücken
- Gebrauchtes Stäbchen wieder in die Verpackung schieben
- Kappe mit Tropferspitze fest aufdrehen
- Röhrchen wirbeln und schütteln

# 5

- Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
- Kappe von der Tropferspitze abdrehen
- Röhrchen vorsichtig zusammendrücken und 4 Tropfen auf Testkassette tropfen (Vertiefung S)

# 6

- 15 Minuten warten
- Das Ergebnis ablesen

# 7

Ergebnisinterpretation

- C T NEGATIV
- C T POSITIV
- C T UNGÜLTIG